

So verbinden Sie die App

Hinweis

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es erfolgreich mit dem Mobiltelefon über Android/iOS verbunden ist.

1

Laden Sie die App herunter.

iOS: Suchen Sie nach „bebird“ im App Store.
Android: Suchen Sie nach „bebird“ in Google Play.



Oder scannen Sie den QR-Code um die App herunterzuladen.



2

Öffnen Sie die Verschlusskappe. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.



3

Öffnen Sie die App. Verbinden Sie das Gerät mit dem Wi-Fi.



4

Bitte verbinden Sie sich mit dem WLAN des Geräts „bebird-M9-xxxxxx“.



5

Gehen Sie zurück zur bebird App und klicken Sie auf „geh verbinden“.



6


Sie erhalten diese Anzeige.



Produktübersicht



Verschlusskappe

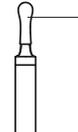


Cerumen-
reinigungsaufsatz

Kontrollleuchte

- Das rote Licht signalisiert den Ladevorgang. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.

- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das blaue Licht schnell.

- Blaues Licht blinkt, wenn das Wi-Fi des Produkts nicht verbunden ist. Das blaue Licht leuchtet immer, wenn das Wi-Fi des Produkts nicht verbunden ist.

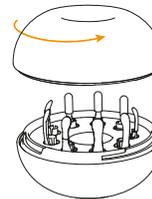

Ablageständer
mit 9 Cerumenreinigungsaufsätzen.


Ladeanschluss

Cerumenreinigungsaufsatz wechseln



Wenn der Reinigungs-
aufsatz beschädigt ist,
wechseln Sie diesen
sofort aus.

Bitte stellen Sie
sicher, dass der
Aufsatz sicher befestigt
wurde.

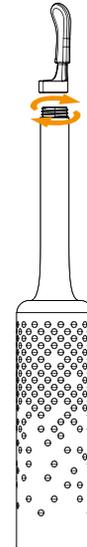

Schrauben Sie den
Reinigungs-
aufsatz ab und ersetzen ihn
durch einen neuen.

Bitte ersetzen Sie den
Cerumenreinigungsaufsatz alle 1-2 Monate,
um Alterung und Beschädigung
zu vermeiden.

Zubehör

1

Cerumen-
reinigungsaufsatz 9x




2

Ladekabel
1 x



3

Ablageständer
1 x

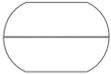

4

Wattestäbchen
(zur Linsereinigung)
3 x



Problemlösung

Problem	Lösung
Das Produkt arbeitet nach dem Einschalten nicht.	Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel.
Das LED-Licht der Kamera leuchtet nicht.	Unterbrechen Sie die Verbindung, starten Sie das Produkt neu, um die Verbindung erneut herzustellen.
Die App ist abgestürzt.	Löschen Sie die vorhandene App und scannen Sie den QR-Code, um sie neu zu installieren.
Das Signallicht blinkt schnell.	Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel.
Ungewöhnliche Anzeige in der App.	Unterbrechen Sie die Verbindung, starten Sie das Produkt neu, um die Verbindung erneut herzustellen.
Die WiFi-Verbindung ist instabil. Die Verbindung wird nur wenige Sekunden nach dem Verbinden mit dem Mobiltelefon wieder getrennt.	Unterbrechen Sie die Verbindung, starten Sie das Produkt neu, um die Verbindung erneut herzustellen.
Unschärfe der visuellen Benutzeroberfläche.	Bitte wischen Sie es mit einer doppelseitigen Reinigungsbürste oder einem Alkoholtupfer ab.
Orientierungslosigkeit im Gebrauch.	Bitte schalten Sie den Modus für das linke/rechte Ohr in App um.
Wenn Sie weiterhin Probleme mit den oben genannten Verfahren haben, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Kundendienstmitarbeiter, um weitere Unterstützung zu erhalten.	

Achtung

1. Wischen Sie die Linse beim Reinigen vorsichtig mit einem Alkohol-Wattestäbchen ab.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie sich bewegen. An einem sicheren Ort verwenden, um zu vermeiden, dass Sie von anderen gestoßen werden.
3. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
4. Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt von einem Erwachsenen verwenden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder tauchen Sie es in Flüssigkeit, um Schäden zu vermeiden.
6. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie. Bei seltener Verwendung wird empfohlen, den Akku einmal im Monat aufzuladen.
7. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie das Zubehör auch von direkter Sonneneinstrahlung fern, um ein Aufweichen zu vermeiden.
8. Während des Gebrauchs kann sich das Gerät leicht erwärmen (bis zu 35 Grad). Dies ist normal und Sie können das Gerät weiterhin verwenden.
9. Wenn Sie das Gerät an einem Kind verwenden, halten Sie das Kind für ein optimales Erlebnis in einer sitzenden Position und verwenden Sie das Gerät horizontal.

Produktspezifikationen

Marke	bebird
Produktname	Smart Visual Ear Cleaner
Modell	M9 S
Netzwerkstandard	IEEE 802.11b/g
Antenne	Interne FPC Antenne
Arbeitsfrequenz	2,4 Ghz
Bildrate	20 fps
Bildsensor	CMOS
Arbeitstemperatur	-10 ~ 50 °C
Akku	230 mAh Lithiumbatterie
Akkulaufzeit	ca. 90 Minuten
Ladezeit	ca. 60 Minuten
Eingangsleistung	5 V 0,5 A
Lensendurchmesser	3,5 mm
Optimale Brennweite	13,5 mm
Auflösung	10 Mega-Pixel
Gyroskop	Kardanisch aufgehängtes, intelligentes Gyroskop

bebird M9 S
Smart Visual Ear Cleaner



Garantie

Benutzer Info

Benutzername: _____ Tel. _____

Adresse: _____

Händler: _____ Tel. _____



Achtung:
Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer höheren Ausgangsspannung als 5V.

Gefahrstoffe

Artikel Name	Gefahrstoffe					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Leiterplatte	X	○	○	○	○	○
Gehäuse	○	○	○	○	○	○
Plastik Zubehör	○	○	○	○	○	○

Dieses Formular ist gemäß SJ/T11364 erstellt.

○ Die Inhaltsstoffe sind höher als GB/T26572-2011.

X Die Inhaltsstoffe sind niedriger als GB/T26572-2011.