

Hygieneplan (in Anlehnung an GUV-R 206 1999-10)

| Was | Wann | Wie | Womit / Dosierung / Einwirkzeit |
|--|--|---|--|
| Hände  | vor / nach jedem Kunden-/ Hörgerätekontakt bei Bedarf / nach Arbeitsende | Entfernung relevanter Krankheitskeime durch Einreiben mit antimikrobiellem Gel oder Flüssigkeit. Auch ohne Wasser und Handtuch anzuwenden. Zur Hautpflege einreiben. | nach Herstellervorgabe anwenden cedis Profi CARE |
| Mund / Nase  | bei jedem Kontakt | Maske nie mit kontaminierten Händen anfassen und grundsätzlich nicht den Mundbereich der Maske berühren. | je Mitarbeiter ein Mund-Nase-Schutz / Tag |
| Hörgerät  | vor/nach jedem Service | Einsprühen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Desinfektionsspray 1 Minute Einwirkzeit cedis Desinfektionstücher 1 Minute Einwirkzeit |
| Otoplastik  | vor/nach jedem Service | Desinfizieren und Reinigen im Tauch- oder Ultraschallbad, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Profi UltraActiv, 7,5 % 1 Minute Einwirkzeit |
| Abdruck  | Abdrucknahme | Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Desinfektionstücher 1 Minute Einwirkzeit |
| Werkzeuge / Medizinische Instrumente  | nach jeder Anwendung | Einsprühen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. Desinfizieren und Reinigen im Tauch- oder Ultraschallbad, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Desinfektionsspray 1 Minute Einwirkzeit cedis Desinfektionstücher 1 Minute Einwirkzeit cedis Profi UltraActiv, 7,5 % 1 Minute Einwirkzeit |
| Arbeitsplatz / Medizinische Geräte  | vor / nach jedem Kunden-/ Hörgerätekontakt | Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit abtrocknen. | cedis Profi SURFACE 2 1 Minute Einwirkzeit |
| Kopfhörer  | nach jeder Anwendung | Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Desinfektionstücher 1 Minute Einwirkzeit |
| Otoskoptrichter  | nach jeder Anwendung | Desinfizieren und Reinigen im Tauch- oder Ultraschallbad, nach der Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. | cedis Profi UltraActiv, 7,5 % 1 Minute Einwirkzeit |

Bitte Produktinformation beachten.
Zum Abtrocknen verwenden Sie Einmal-Papiertücher.
Alle Details über die oben genannten egger-Produkte entnehmen Sie unserem aktuellen Produktkatalog.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH
Aybühlweg 59
87439 Kempten/Germany

Tel.: +49 (0)831 58113-20
Fax: +49 (0)831 58113-13
E-Mail: labortechnik@egger.online
Internet: www.egger.online