



Prozessbeschreibung – Abdruckvorbereitung

- der erste wichtige Schritt für eine gute Otoplastik
- der bearbeitete Abdruck stellt den Schlüssel zum Erfolg dar
- die Trennschicht beeinflusst die Qualität der späteren Otoplastik in puncto Tragekomfort und Abdichtung
- ist die Basis für alle Otoplastik-Herstellungsprozesse

Bitte beachten Sie auch unsere cedis Profi-Linie zu Arbeitsschutz, Hand- und Hautpflege aus dem cedis Pflegeprogramm.

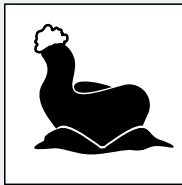

- 1.** Abdruck kontrollieren. Achten Sie auf die exakte Applikation und die Gehörgangslänge.

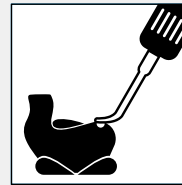


- 4.** Unebenheiten, Löcher, Rillen etc. mit Korrekturwachs ausgleichen.




- 2.** Gehörgang und Cymba des Abdrucks beschneiden.



- 5.** Trennschicht (Wachs oder Lack L) dünn und gleichmäßig auftragen.

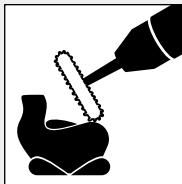

- 3.** Kanten von Schnittstellen abrunden und Oberfläche sanft glätten.

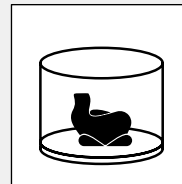

- 6.** Abdruck in der passenden Kuvette/Einbettform des gewählten Herstellungsprozesses fixieren.