

Kunststoffhandgriff zum Eindrehen in weiche Otoplastiken – mit praktischer Öse.

Set ohne Verbindungsschnur bestehend aus fünf roten und fünf blauen Handgriffen.

Plastic handles to be screwed into soft earmolds – with practical loop.

Set with five red and five blue handles without plastic connecting cord.

☐ REF 36988

Optional: Set mit Verbindungsschnur

Je ein roter und blauer Handgriff mit fest verbundener farbiger Kunststoffverbindungsschnur.

Optional: Set with connecting cord

One red and one blue handle with fixed colored plastic connecting cord.

☐ blau/blue REF 369881

☐ rot/red REF 369882

☐ transparent REF 369883

☐ schwarz/black REF 369884

☐ weiß/white REF 369885

☐ grün/green REF 369886

☐ pink REF 369887

☐ lila/purple REF 369888



Handgriff-Set

Handle set

Für weiche Otoplastiken
For soft earmolds

Bedienungsanleitung

Formgebung und Ausarbeitung der Otoplastik in gewohnter Weise durchführen.

An der Otoplastik-Außenfläche verbleibt eine plane Fläche im Durchmesser des Handgriffs. Entsprechend der Ohrseite wird der Handgriff (rot = rechts, blau = links) mittig in die plane Fläche eingedreht.

Als Oberflächenfinish empfehlen wir bei Silikon-Otoplastiken die Lackierung mit dem lufttrocknenden egger Silikonlack L, egger Lack L nano oder mit dem heißvulkanisierenden egger Lack signo.

Operating Instructions

Modeling and shaping of earmold in the usual manner.

A flat surface with the diameter of the handle will remain on the outer surface of the earmold. Corresponding to the side of the ear, the handle is screwed into the center of the flat surface (red = right, blue = left).

As surface finish we recommend varnishing the silicone earmold with air-drying egger silicone lacquer L, egger silicone lacquer L nano or with hot-vulcanizing egger lacquer signo.