

cedis Profi UltraActiv

Pour désinfection et nettoyage des instruments médicaux pour la prise d'empreinte et des embouts contours d'oreille – efficace contre les bactéries, champignons, virus VHB et VIH.

Durée d'action : 1 minute

Application solution de 7,5 % (925 ml de l'eau + 75 ml de cedis Profi UltraActiv) :

Mettre les instruments ou les embouts contours d'oreille dans la solution de 7,5% et humecter entièrement et laisser agir 1 minute avant de sécher la surface à l'aide d'un tissu absorbant. Conseil : Pour des raisons d'hygiène, l'utilisation d'un bain à ultrasons est conseillée pour désinfecter les embouts contours d'oreille et les instruments pour la prise d'empreinte. Pour cela les verres de nettoyage disponibles en différentes tailles spécialement conçus pour les appareils à ultrasons ont prouvé leur efficacité.

⚠ Les objets en contact avec la peau (par ex. les systèmes auditifs ou les embouts) doivent impérativement être séchés avec un chiffon absorbant après avoir été désinfecté.

Mention de danger et conseil de prudence pour le concentré :

Phrases H : 314-410 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Phrases P : 101-102-262-310-280-303+361+353-305+351+338-273

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :** enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éviter le rejet dans l'environnement.

Conseil de prudence en general : Utilisez le concentré avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Éliminez ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Concentrado para la desinfección y limpieza de instrumentos medicinales y moldes para sistemas retroauriculares – eficaz contra bacterias, hongos y los virus VHB y VIH.

Tiempo de actuación: 1 minuto

Aplicación: En solución de 7,5 % (925 ml de agua + 75 ml de cedis Profi UltraActiv): Poner los moldes retroauriculares o los instrumentos en la solución de 7,5% y humedecerlos completamente. Después de 1 minuto de actuar, removerlos y secarlos con un paño absorbente. Consejo: Por motivos higiénicos, antes de la aplicación se recomienda limpiar los moldes retroauriculares y los instrumentos en el baño ultrasónico. Por eso se han probado los vasos de limpieza, dispuestos en diferentes tamaños, llenado con limpiador desinfectante, usado especialmente para aparatos ultrasónicos.

⚠ Tras la desinfección, seque los productos en contacto con la piel (por ejemplo, los sistemas auditivos, moldes) con un paño absorbente.

Indicaciones de peligro y consejos de prudencia para el concentrado:

Frases H : 314-410 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Frases P : 101-102-262-310-280-303+361+353-305+351+338-273

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) :** Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS :** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Evitar su liberación al medio ambiente.

Consejos de prudencia generales: Utilice los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Deposite este producto y su envase en un punto de recogida de residuos especiales.

Ingrédients / Ingredientes: (*solution de 7,5 % /

*solución de 7,5%) / 100 g

3.3 g (*0.25 g) alkylbenzyl dimethylammoniumchloride, 3.3 g (*0.25 g) alkylethyl-

benzyl dimethylammoniumchloride, 3.3 g

(*0.25 g) didecyl dimethylammoniumchloride

Danger/Peligro



egger Otoplastik + Labor-
technik GmbH · Aybühlweg 59
87439 Kempten/Germany

REF 862084

REF 862085

500 ml e
2 L e