

## Agent désinfectant et nettoyant

cedis Profi SURFACE 2 est un agent désinfectant prêt à l'emploi pour des petites surfaces et le matériel dans les cabinets médicaux , maisons de retraite, cliniques. cedis Profi SURFACE 2 agit contre les bactéries, virus (VHB/VIH) et les champignons (Candida Albicans).

Durée d'action : 1 minute.

Mettre un peu de liquide sur un tissu propre et humecter avec toute la surface de l'objet traité. Ne pas frotter les surfaces avec le tissu sec pendant/et à la fin du temps d'action.

### Attention :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Benzisothiazoline. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne plus utiliser une fois la date limite de conservation dépassée.

### Contenu de 100 g d'agent désinfectant :

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 0.25 g,  
Didecyldimethylammoniumchloride 0.25 g,  
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chloride 0.25 g

 egger Otoplastik + Labortechnik GmbH  
Aybühlweg 59  
87439 Kempten/Germany

500 ml



## Líquido de desinfección y de limpieza

cedis Profi SURFACE 2 es un desinfectante listo para usar apto para superficies pequeñas y equipo en consultorios médicos, residencias y clínicas médicas. cedis Profi SURFACE 2 es eficaz contra bacterias, los virus (VBH/VIH) y hongos (Candida albicans).

Tiempo de reacción: 1 minuto.

Regue el líquido en un paño desechable y humedecer completamente las superficies. No séque las superficies durante el tiempo de reacción.

### Atencion:

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene Benzisothiazoline. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio ambiente. No seguir usando tras la fecha de consumo preferente.

### Contentdo de 100 g de líquido desinfectante:


Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 0.25 g,  
Didecyldimethylammoniumchloride 0.25 g,  
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chloride 0.25 g



0483



LOT

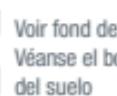

Voir fond de boîte/  
Véanse el borde  
del suelo



4 0 4 8 8 2 6 8 6 2 1 4 9